

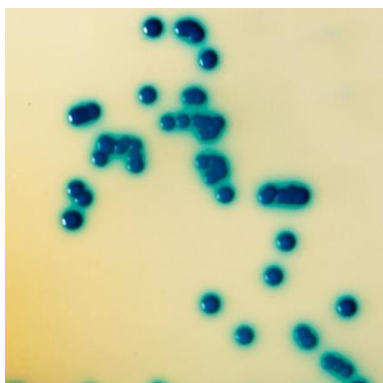
CHROMagar™ ORIENTATION. ΚΩΔΙΚΟΙ: 010030 - 050030

Το CHROMagar ORIENTATION χρησιμοποιείται για τη χρωματική διαφοροποίηση των παθογόνων της ουρογεννητικής οδού αλλά και άλλων κλινικών δειγμάτων με την *E. Coli* να δίνει κόκκινες αποικίες, την *Klebsiella* μεταλλικές μπλε, τον *Proteus mirabilis* διαυγής με καφέ άλω και τον *Enterococcus faecalis* γαλαζοπράσινες με γαλάζια άλω.

Έτσι κάνουμε εύκολη οπτική ανίχνευση καλλιιεργειών με μεικτή χλωρίδα.

***Escherichia coli***

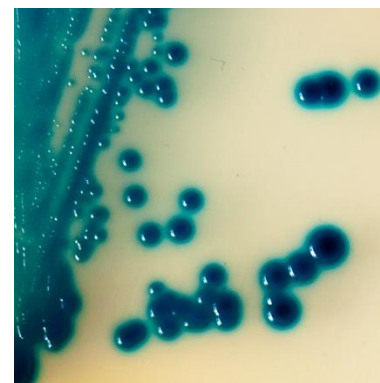
Χρώμα αποικίας: Κόκκινο – κεραμιδί

***Enterococcus faecalis***

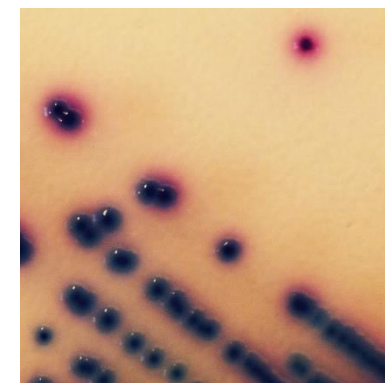
Χρώμα αποικίας: Γαλαζοπράσινες με γαλάζια άλω

***Proteus mirabilis***

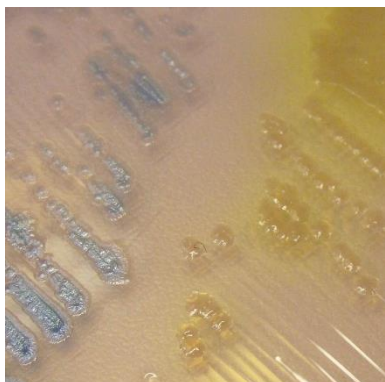
Χρώμα αποικίας: Άχρωμες – μπεζ με καφέ άλω

***Klebsiella pneumoniae***

Χρώμα αποικίας: Μπλε μεταλλικό

***Citrobacter***

Χρώμα αποικίας: Μπλε μεταλλικό με κόκκινη άλω

***Pseudom. Aeruginosa***

Χρώμα αποικίας: Κίτρινο – μπλε με πράσινο υλικό

***Staphylococcus aureus***

Χρώμα αποικίας: Κίτρινο ανοιχτό

***Staphylococcus Saprophyticus***

Χρώμα αποικίας: Ροζ ανοιχτό

***Streptococcus agalactiae***

Χρώμα αποικίας: Ανοιχτό μπλε

***Candida albicans***

Χρώμα αποικίας: Λευκό κρεμώδες

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ: Ορισμένα στελέχη *E. coli* μπορεί να παρουσιάσουν απαλό ροζ έως άχρωμο χρώμα στις αποικίες τους. Η τελική ταυτοποίηση μπορεί να απαιτήσει επιπλέον δοκιμές όπως βιοχημικές ή ανοσολογική δοκιμή (συγκόλληση λατέξ).